

唾液測定者が、専用綿棒に唾液を含ませる取扱い方法

製造・総発売元
株式会社リーブアンドラブ
〒335-0001 埼玉県蕨市北町 5-7-12
TEL 048-447-7161 FAX048-447-7163
<http://livelove.link>

唾液測定する方に唾液測定専用綿棒に十分唾液を含ませて下さい。

1. 口を開けて舌の上、中央で口を閉じて唾液を十分に含ませるようお願いして下さい。
2. 唾液が十分綿棒に含まれないと綿棒がやわらかくなりません。
 - 測定不能・綿棒・電極？の表示がでて測定ができません。
 - 唾液が少ないと白金電極にキズがつき次回の測定数値が不安定又は測定できなくなりします。
3. 唾液が綿棒に十分含まれているかの目安は試料槽に綿棒を差し込んだときに試料槽に唾液がある程度しみ出る程度が目安です。
4. 女性の方は唾液測定専用綿棒の先端に口紅をつけないようにして下さい。